

# FORWARTS®

## Voor de behandeling van wratten op handen en voeten

FORWARTS® IS EEN MEDISCH HULPMIDDEL. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U FORWARTS® GEBRUIKT. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM DEZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. GEBRUIK FORWARTS® UITSLUITEND OP HANDEN EN VOETEN.

### De verpakking van Forwarts moet het volgende bevatten:

- Het product met daarin een spuitbus gevuld met 35 ml koelgas (100% Dimethylether). De spuitbus bevat voldoende koelgas voor ten minste 10 behandelingen.
- Deze gebruiksaanwijzing met belangrijke informatie over het product, de behandelingsmethode, veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
- 10 beschermende pleisters, die kunnen voorkomen dat omliggende, gezonde huid beschadigd raakt.

**Beoogd gebruiksdoel:** Forwarts® is bedoeld voor het verwijderen van wratten op handen en voeten.  
**Beoogde gebruikers:** Forwarts® is bedoeld voor gebruik door consumenten (leken). Het is beoogd voor behandeling van volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar. Dit product dient te worden aangebracht door personen van 18 jaar of ouder.

### Wat zijn gewone wratten en voetwratten?

**Gewone wratten** (ook bekend als verruca vulgaris) zijn kleine, goedaardige gezwellen op de huid die te herkennen zijn aan hun bloemkoolachtige vorm. Gewone wratten zijn huidkleurig en verschijnen meestal op handen en voeten. Ze zijn vaak hard en ruw en hebben een gemiddelde grootte van 3 tot 6 mm. Ze worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV) en zijn zeer besmettelijk. Het virus geeft de voorkeur aan warme en vochtige delen van de huid waar het gemakkelijk kan binnendringen.  
**Voetwratten** (ook bekend als verruca plantaris) zijn wratten aan de onderkant van de voeten en tenen, vooral op plekken die worden blootgesteld aan druk of wrijving. Voetwratten worden ook veroorzaakt door het HPV en worden gekenmerkt door hun ruwe, korrelige uiterlijk. Ze kunnen zwarte puntjes op het oppervlak hebben en pijnlijk aanvoelen, vooral als u loopt of staat.

### Hoe werkt Forwarts?

Forwarts® is een medisch hulpmiddel voor het eenvoudig thuis verwijderen van wratten op handen en voeten. Forwarts® bevriest de wrat tot in de kern door gebruik te maken van een precies straaltje koelgas. De ring van het mondstuk en de meegeleverde beschermingspleisters zorgen ervoor dat de omliggende huid minimaal wordt aangetast. Een effectieve behandeling gaat gepaard met een tijdelijke verbleking van de huid en een jeukend of prikkend gevoel. De huid kan daarna rood worden en er kunnen blaren ontstaan. Na de behandeling vallen wratten normaal gesproken binnen 10-14 dagen van de huid af. In de tussentijd heeft zich onder het behandelde gebied nieuwe huid gevormd.

### Wist u dat?

- Grofweg 2 van de 3 gebruikers van Forwarts® ervaart binnen 2 weken na de eerste behandeling verbetering van de wrat of voetwrat.
- Uiteindelijk ervaart grofweg 1 op de 2 gebruikers van Forwarts® een volledige verwijdering van de wrat of voetwrat binnen 3 maanden na aanvang van de behandeling.
- Over het algemeen verdwijnen 2 van de 3 wratten of voetwratten op natuurlijke wijze binnen 2 jaar.
- Klinische onderzoeken (Kwok et al. 2012) tonen aan dat ongeveer 2 op de 5 wratten, of 1 op de 4 voetwratten, effectief worden verwijderd door behandeling met vloeibare stikstof in de huisartsenpraktijk.

Volg voor een effectieve behandeling zorgvuldig de (voor-)behandelinstructies op. Houd er rekening mee dat grotere wratten en wratten met veel eelt (met name voetwratten) mogelijk meerdere behandelingen (maximaal 4) nodig hebben om te worden verwijderd. Voetwratten die groter zijn dan 6 mm en die veel eelt bevatten, worden mogelijk niet effectief verwijderd door Forwarts®.

### Gebruik het product niet:

- Bij personen met diabetes of een slechte bloedcirculatie.** De bevroren plek geneest bij mensen met diabetes of een slechte bloedcirculatie mogelijk niet zo snel of niet volledig.
- Bij personen met een aandoening die het immuunsysteem verzwakt.**
- Bij personen die zwanger zijn of borstvoeding geven.**
- Bij kinderen onder de 4 jaar.**
- Het product mag enkel worden toegediend door personen boven de 18 jaar. Gebruik niet als u jonger bent dan 18 jaar.**
- Als u niet zeker weet of de huidaandoening een wrat of een voetwrat is. Indien u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.
- Als u de informatie in de gebruiksaanwijzing niet kunt lezen en begrijpen. Personen met een visuele of fysieke beperking wordt geadviseerd hulp te vragen bij het gebruik van Forwarts®.
- Op andere plekken van het lichaam dan handen en voeten.
- Op gevoelige huid; bijv. ontstoken huid, beschadigde huid, op snijwonden of geschaafde huid, op aangetaste of jeukende huid. Wees extra voorzichtig bij het behandelen van wratten in de buurt van zenuwen en pezen.
- Bij wratten of voetwratten die haartjes hebben of bloeden. Bij waterwratjes (molluscum contagiosum), huidwratjes of genitale wratten.

- Bij wratten dicht bij (of onder) de nagel, slijmvliezen zoals in de mond, neus of andere lichaamsopeningen.
- Bij plekken met verminderde bloedtoevoer of zenuwfunctie.
  - Om geboortevlekken, moedervlekken, recente vasculaire en onregelmatige gezwellen, melanomen of andere tekenen van huidkanker te verwijderen.
  - Bij dezelfde wrat of voetwrat binnen 14 dagen na een eerdere behandeling.
  - Meer dan 4 keer bij dezelfde wrat of voetwrat. Als de wrat of voetwrat niet verdwijnt na meerdere behandelingen of als de wrat of voetwrat veel ongemak veroorzaakt, vraag dan medisch advies aan uw arts.
  - In combinatie met andere wratten verwijderingsproducten.
  - Terwijl u afgeleid bent of in de buurt van bronnen van afleiding bent.
  - Wanneer u allergisch bent voor het ingrediënt, Dimethylether.



### Waarschuwing!

- Gevaar! Zeer licht ontvlambare spuitbus. Inhoud onder druk. Kan openbarsten bij verhitting. Niet in de richting van open vuur of op andere ontstekingsbronnen sprayen. Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Doorboren van de houder of blootstelling aan de hitte kan ertoe leiden dat de houder explodeert en ernstig letsel veroorzaakt. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
- Gebruik Forwarts® in een goed geventileerde ruimte. Damp/spray niet inademen. Inademen van damp/spray kan giftig zijn.
- Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Kinderen kunnen de gebruiksaanwijzing niet begrijpen of het product op de juiste manier gebruiken.
- U kunt tijdens het aanbrengen een scherpe en intense pijn ervaren, mogelijk gevolgd door een tijdelijk tintelend of prikkend gevoel, met name in het geval van voetwratten.
- Gebruik Forwarts® altijd volgens de gebruiksaanwijzing. Als het product niet exact wordt gebruikt zoals voorgeschreven of per ongeluk wordt gebruikt op aandoeningen die geen wratten zijn, kan het koude brandwonden, blaren, pigmentverlies, zenuwbeschadiging, littekens op de huid en, als het in de ogen wordt gespoten, blindheid veroorzaken.
- Forwarts® bestaat uit meerdere onderdelen. Niet uit elkaar halen. Niet gebruik en als de onderdelen van het product niet gemonteerd en/of beschadigd zijn. Geen onderdelen inslikken.
- Beschermende pleisters zijn steriel en uitsluitend voor eenmalig gebruik.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Wanneer wratten zich dicht bij elkaar bevinden, behandel elke wrat dan afzonderlijk met een tussenpoos van 14 dagen.
- Wanneer een wrat op vingers of tenen wordt behandeld, zorg er dan altijd voor dat ook de gezonde, omliggende huid, van de aangrenzende vingers of tenen, wordt beschermd om onbedoeld bevriezen te voorkomen.
- Gebruik Forwarts® bij kamertemperatuur.
- Behandeling kan minder effectief zijn bij grote voetwratten met veel eelt, die diep naar binnen zijn gegroeid.
- Gebruik het hulpmiddel uitsluitend met het mondstuk naar beneden gericht.
- Gebruik Forwarts® niet na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Zie onderzijde spuitbus.
- De spuitbus dient uitsluitend als huishoudelijk afval te worden afgevoerd als de inhoud volledig is opgebruikt. Ongebruikt product dient als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

### Bewaren:

- Koel en droog bewaren bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.
- Bewaar het hulpmiddel, de instructies en de pleisters in een schone omgeving, zoals in de kartonnen doos.

### Mogelijke bijwerkingen en risico's:

- Een scherp **prikkend** of **jeukend** gevoel tijdens en na de behandeling dat snel afneemt nadat de plek ontdood is.
- Licht ongemak als gevolg van een **blaar**, **brandwond** of **beschadigde huid** na de behandeling. Dit is normaal en kan twee weken aanhouden. Neem contact op met uw arts als u ernstig ongemak ervaart.
- Een kleine mate van **pigmentverlies**, **littekenvorming** op de huid of **gevoelloosheid** (zenuwbeschadiging). Dit is meestal van tijdelijke aard.

### Instructies:

**Gebruik een timer tijdens de behandeling.** Behandel de huid niet langer dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Overmatige blootstelling aan het koelgas kan brandwonden veroorzaken.

**Overweeg om een beschermende pleister te gebruiken.** Als de wrat veel kleiner is dan de ring van het mondstuk (wratdiameter: 1 - 3 mm) kunt u ervoor kiezen om een passende beschermende pleister rond de wrat te plaatsen, om onnodige blootstelling van gezonde huid te voorkomen. Let op: voor maximale effectiviteit moet een klein randje (1 mm) van de gezonde omringende huid onbedekt blijven. De pleisters hebben 2 verschillende maten openingen (4 en 6 mm). Als de locatie van de wrat geen stabiele positionering van de ring van het mondstuk toelaat, wordt het gebruik van een beschermende pleister geadviseerd om ondersteuning te bieden.

**Voetwrat behandelen?** Er wordt bij het behandelen van voetwratten of wratten met veel eelt geadviseerd om de huid eerst ongeveer 10 minuten in lauw water te weken en overtollig eelt bovenop de wrat te verwijderen. Zorg dat u uw huid voorafgaand aan de behandeling goed droogmaakt. Het is belangrijk om bij de behandeling van wratten aan de onderkant van de voet het product rechttop te houden (mondstuk naar beneden gericht). Dit kan een uitdaging zijn!


**Bij eerste gebruik:** Houd het product comfortabel in één hand en maak uzelf vertrouwd met de methode door kort in de lucht te sprayen met het mondstuk naar beneden gericht. Er moet een lichte sproeinevel en een sissend geluid worden geproduceerd. Voer geen behandeling uit als spray niet aan deze beschrijving voldoet!

**Behandelingsduur bepalen.** Kies de juiste behandelduur (10 of 15 seconden ononderbroken, zie onderstaande tabel) en zet een timer klaar.

|  | HAND<br> | VOET<br>Holte, tenen,<br>boven- en zijkant<br> | VOET<br>Hiel en bal<br>van de voet<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 10 seconden                                                                                 | 10 seconden                                                                                                                       | 15 seconden                                                                                                               |

### STAP 1 – POSITIONEER:

Plaats het mondstuk over de wrat, zoals te zien in de afbeelding.

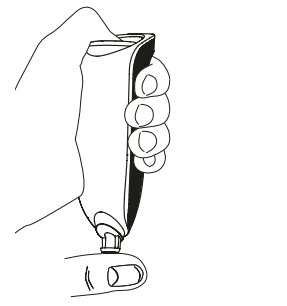


Zorg ervoor dat de ring van het mondstuk volledig contact maakt met het oppervlak rondom de wrat en houd uw elleboog stabiel.

Houd het product rechttop met het mondstuk naar beneden gericht.

Start de timer.

### STAP 2 – SPRAY:

Druk de spuitbus langzaam in met uw duim in en blijf gedurende 10 of 15 ononderbroken seconden sprayen.

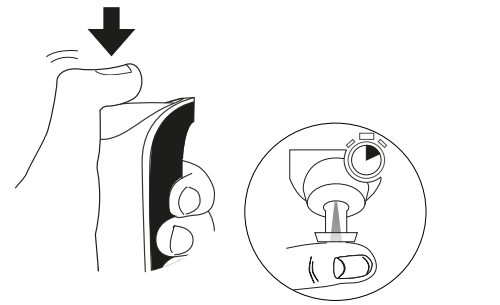

### Na de behandeling:

- Verwijder de beschermende pleister van de huid (indien aangebracht).
- Reinig voor de hygiëne de ring van het mondstuk na elk gebruik met een wattenschijfje gedrenkt in ontsmettingsalcohol (70%). Veeg de hele ring van het mondstuk grondig schoon, inclusief de binnenkant. Reinig het mond stuk altijd na elke behandeling.
- Onder de wrat of voetwrat kan zich een kleine blaar ontwikkelen die de huid tijdelijk donkerder kan doen kleuren. Dit is normaal. Beschadig blaren niet. Dit kan tot infectie leiden.
- Bij uitzonderlijk grote of hardnekkige wratten of voetwratten kunnen meerdere behandelingen nodig zijn. Indien nodig kunt u de behandeling om de 2 tot 3 weken herhalen totdat de wrat of voetwrat is verwijderd of het ongemak is verdwenen. Wacht altijd ten minste 14 dagen voordat u dezelfde wrat behandelt. Behandel de wrat niet meer dan 4 keer achter elkaar.
- Houd de behandelde plek schoon en bescherm deze indien nodig tegen beschadiging met behulp van steriel verband en/of pleisters, vooral in het geval van een beschadigde blaar. Neem contact op met uw arts als u meer ongemak ervaart dan verwacht.
- Vermijd gedurende de eerste 14 dagen na de behandeling blootstelling van de beschadigde huid aan zonlicht.

In geval van ernstige incidenten bij het gebruik van dit hulpmiddel, dient u zowel de fabrikant als uw nationale autoriteit voor medische hulpmiddelen op de hoogte te stellen.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst gewijzigd in Juni 2024.



Fabrikant / Distributeur

Pronova Laboratories BV

Kruitpad 16, 1398 CP

Muiden, Nederland

www.pronovalaboratories.com



FW25NL102 / 59-35560-0102

